

取り付け方法

1

これまで使用していたスリットなしの固定用スクリューをフレームから取りはずします。



2

アップグレードキットのスリット入りスクリューをフレームに装着します。



3

胸腔穿刺でのご使用时

しっかり締め付けたことを確認します。より気密性を高めて使用する際は付属のキーで時計回りに、更に締め付けて固定します。



胸腔穿刺では黒ポンプを使用します。穿刺部位によって、黒ポンプの接続先は付け替えて使用してください。



アップグレードキットへの交換で、新たに第4、第5肋間腔での胸腔穿刺ができるようになります。

取り外し方法

1

取り外すときは、付属のキーをさし、反時計回りにまわして緩めます。



2

本体からフレームを取りはずします。

