

## 430201 気管切開トレーナー

本製品を使用して、経皮的気管切開のトレーニングを行うことができます。

(この手技は、臨床現場において緊急の場合に行われます)

トレーニングを行う前に製品構成を確認し、トレーナーのしくみを理解してください。

本体頭部は容易に取外すことができ、気管部分の皮膚を交換することができます。皮膚は粘着性が高いので、取扱いに注意して下さい。皮膚の位置をずらすことで繰り返し使用することができます。

消耗品については、下記ご参照ください。

注意：皮膚は、剥離紙をはがしてから交換して下さい。

(交換方法)

気管部分は、気管リングから取り外すことが可能ですので、容易に位置変えや交換することができます。

気管部分は、回転又は押し引きして位置を変えることが可能です。ベビーパウダーを使用すると滑りが良くなります。

筋肉部分から気管リングを取り外すには、筋肉をそらすようにしてリングを押し出します。

気管リングは筋肉をゆっくり開くようにしながら、取り外して下さい。

注意：気管リングの背面に四角い突起がついており、筋肉にしっかり固定することができます。

(消耗品)

・430203 交換キット (皮膚×4/気管×2)

・430206 気管 (2本組)

・430204 気管リング

・430205 筋肉部

注意：交換キットに含まれる気管及び皮膚が主な消耗品となります。リング及び筋肉は、使用状況に応じて交換して下さい。キットで30回程度切開を行うことを想定しています。

**日本ライトサービス株式会社**

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

TEL:03-3815-2354 [www.medical-sim.jp](http://www.medical-sim.jp)