



USER GUIDE



乳房診察トレーナー アドバンス

品番: 140201

インデックス

商品構成	2
安全と清掃の手引き	3
セットアップ	4
• 病変モデルをセットする	4
• 乳房診察用インサートの取り外し／取り付け	6
• リンパ節パッドをセットする	7
トレーニング	11
• 乳房を装着して使用する場合	11
清掃と保管	12
• ご使用後の清掃と保管	12

商品構成

装着可能な診察用乳房



乳房診察用病変モデル

140204




乳房診察用インサート

140205



リンパ節パッド (鎖骨／腋窩／リンパ腫)

140203

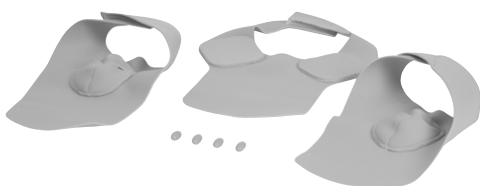

乳房診察用病変サポート

140206



乳房診察用バックプレート

140207



乳房診察用トルソ

140208



安全と清掃の手引き

乳房診察トレーナーを使用される前に、この安全の手引きを確認してください。

DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- このガイドを保管してください。
- すべての警告に注意してください。

- インサートが皮膚内側に付着しないよう、少量のベビーパウダーを乳房スキンの凹部に塗布してください。



- 常に手袋を着用し、貴金属はすべて外してください。爪や指輪などの鋭利な表面は、製品損傷の原因となります。

- 使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



保管と移動



- 人身事故や製品の破損を防ぐため、輸送、保管時には必ず適切な梱包と固定を行ってください。

DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- メーカーが提供するアタッチメント以外は使用しないでください。



- 貴金属をつけたまま使用しないでください。

- 製品を分解したり修理しようとしたりしないでください。
- 製品の点検や修理は販売代理店に連絡をしてください。




セットアップ

病変モデルをセットする

1




180°

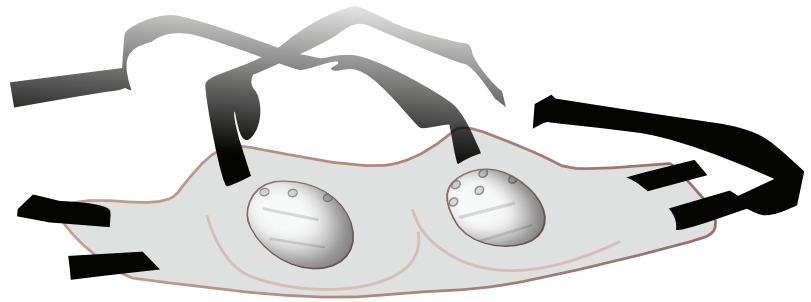

2


バックプレートと病変サポートを取り外す

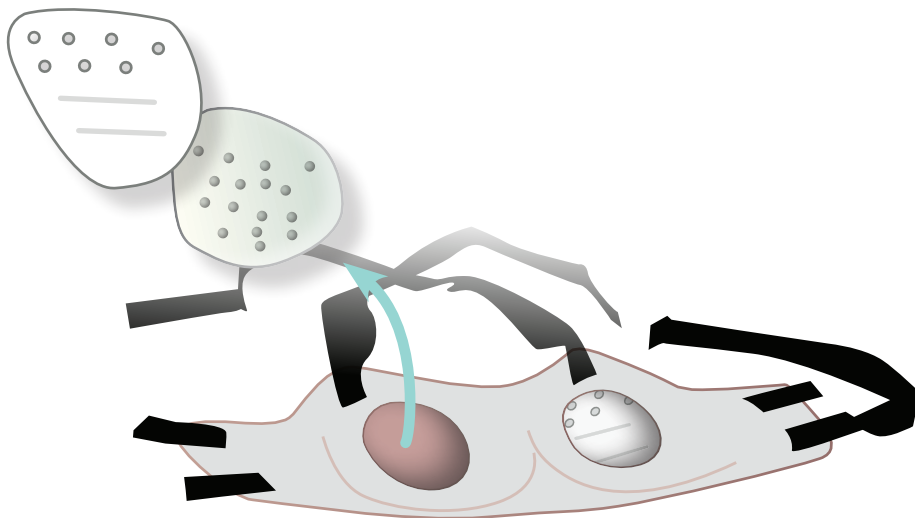


セットアップ

病変モデルをセットする


T 病変モデルは、バックプレートと病変サポートの両方に挿入できます

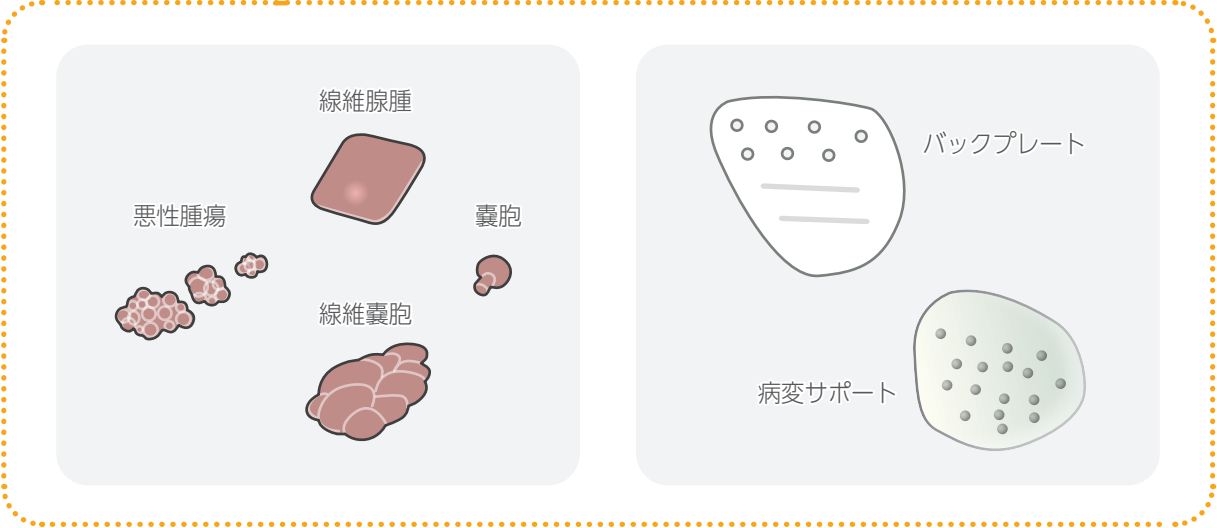


3

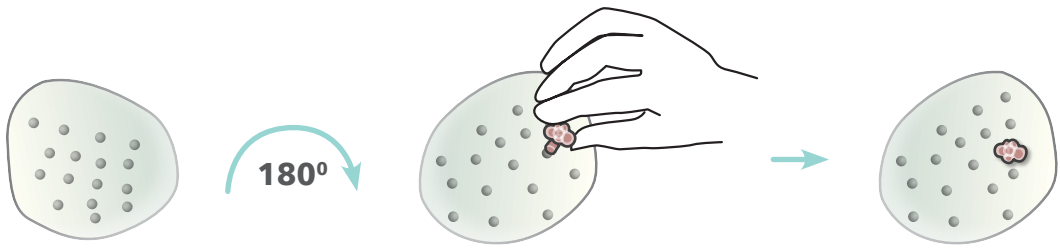

4

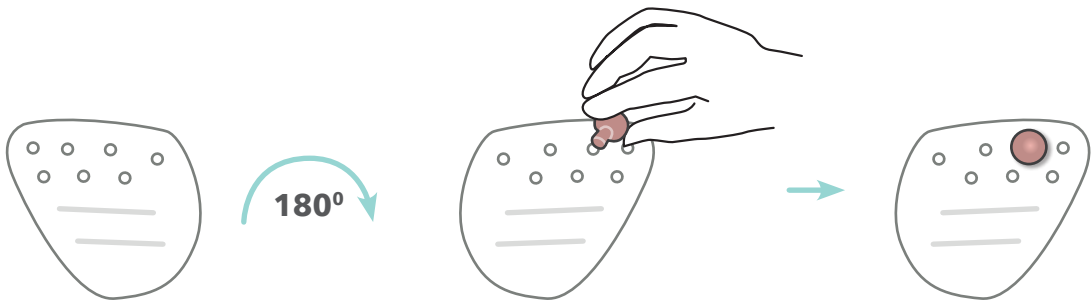


5

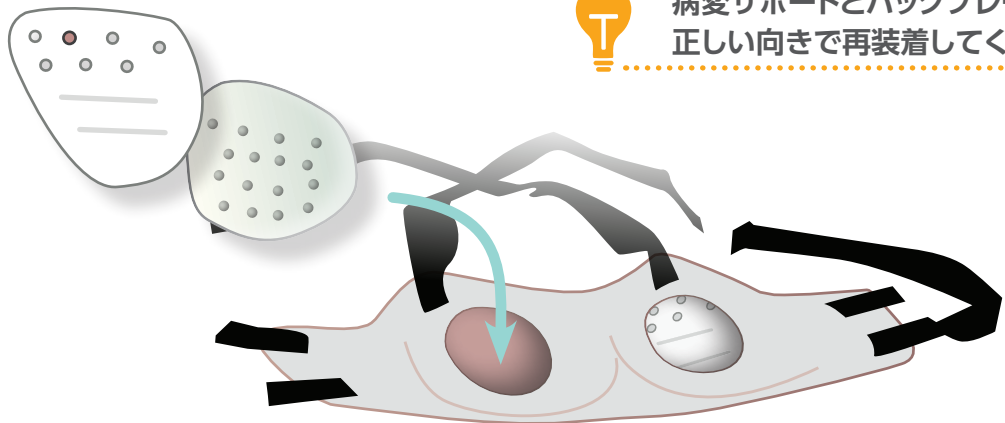


T 病変サポートとバックプレートは正しい向きで再装着してください

セットアップ

乳房診察用インサートの取り外し／取り付け


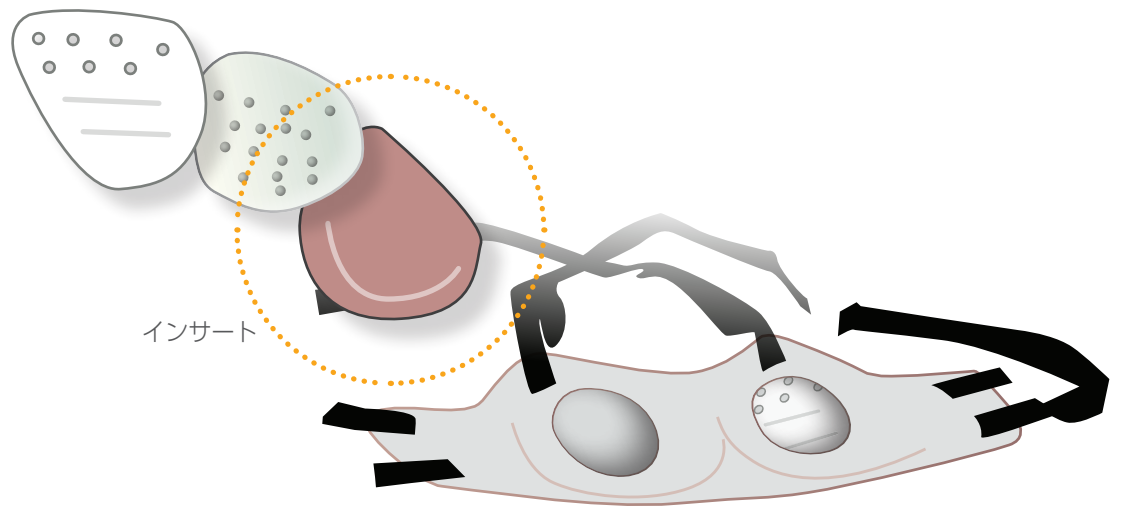


乳房を滑らかにするため、ベビーパウダーを内側に塗布します

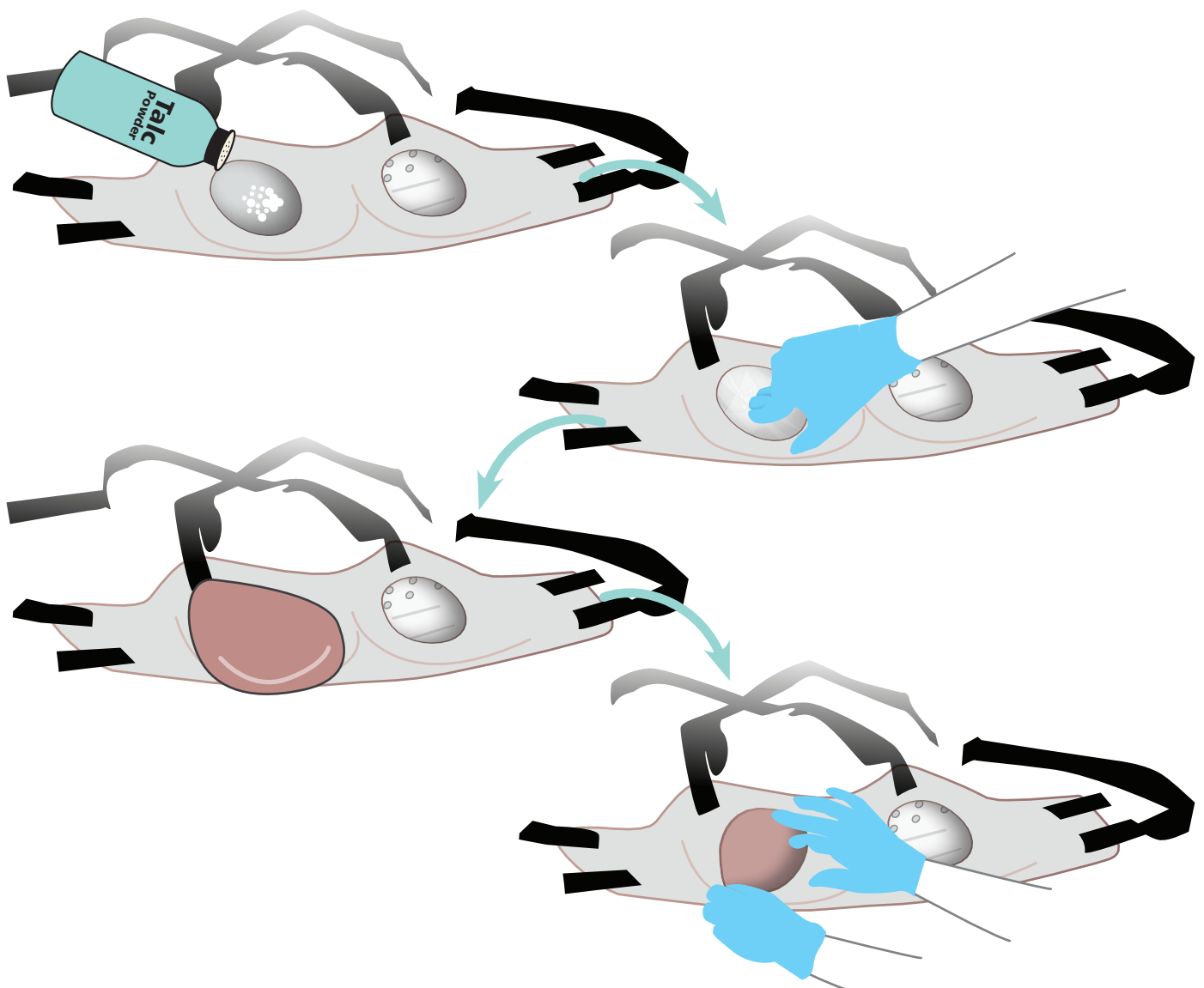

セットアップ



リンパ節パッドをセットする
乳房をトルソに装着する場合

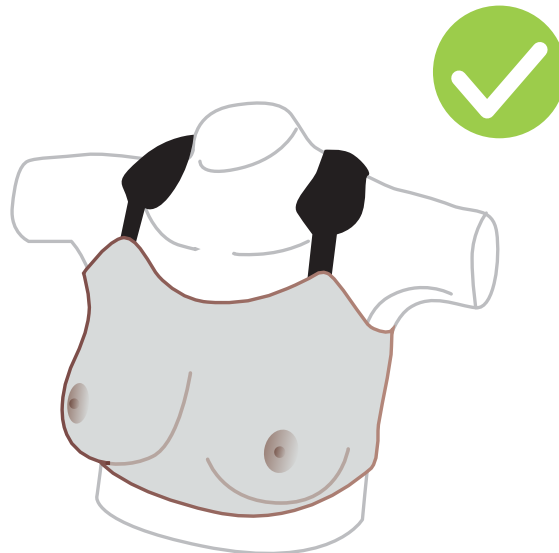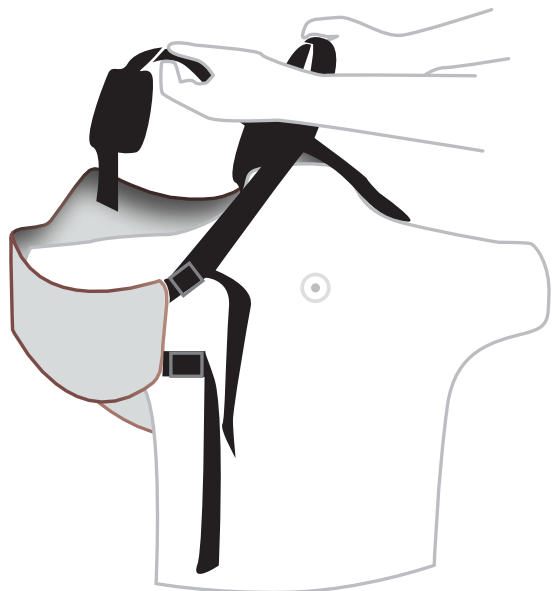

腋窩パッドのセットアップ

腋窩パッドにリンパ腫を挿入する


腋窩パッドを置いて、任意の位置／ポケットにリンパ腫を挿入する

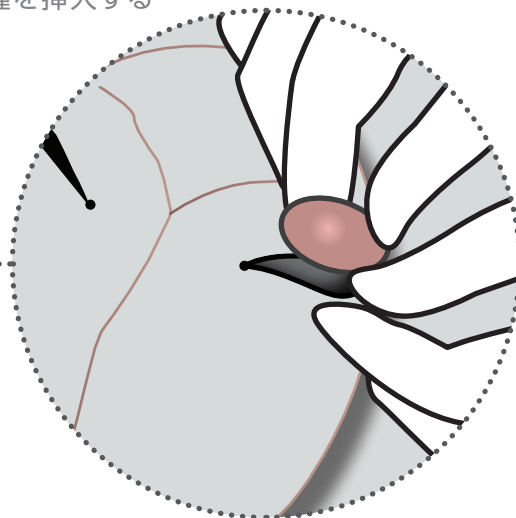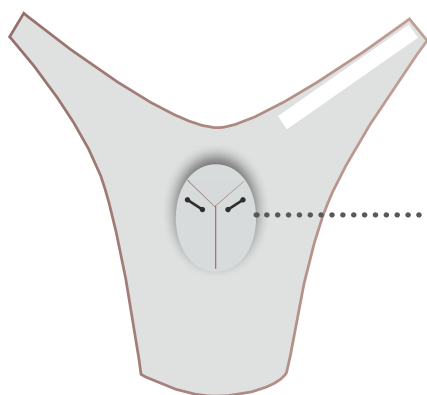

セットアップ

腋窩パッドのセットアップ

腋窩パッドの取り付け／取り外し

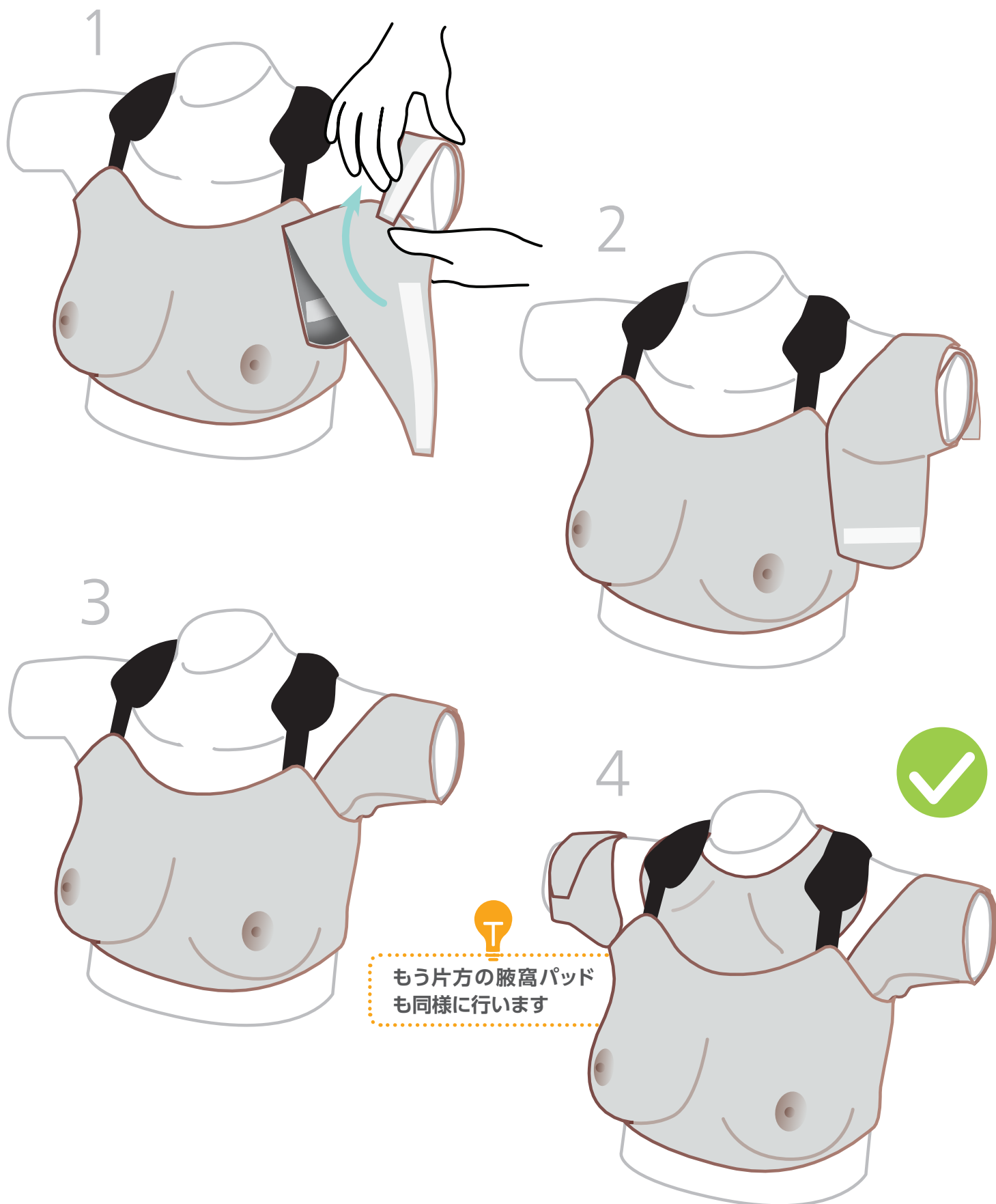


セットアップ

鎖骨パッドのセットアップ

鎖骨パッドにリンパ腫を挿入する



鎖骨パッドを置いて、任意の位置／ポケットにリンパ腫を挿入する

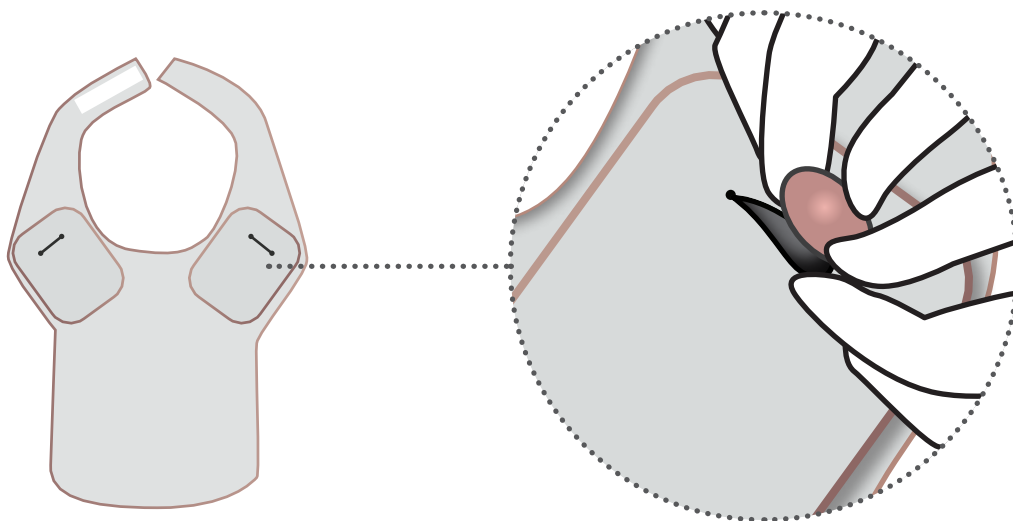

リンパ腫を鎖骨下結節用ポケットの下部に配置する



リンパ腫を鎖骨下結節用ポケットの上部に配置する

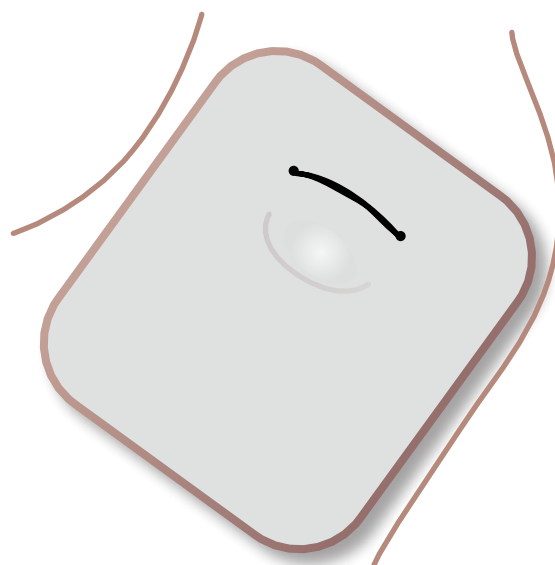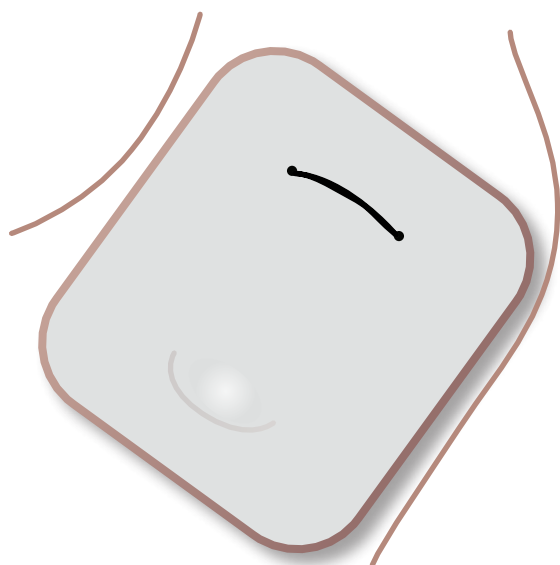


セットアップ


鎖骨パッドのセットアップ

鎖骨パッドの取り付け／取り外し


1

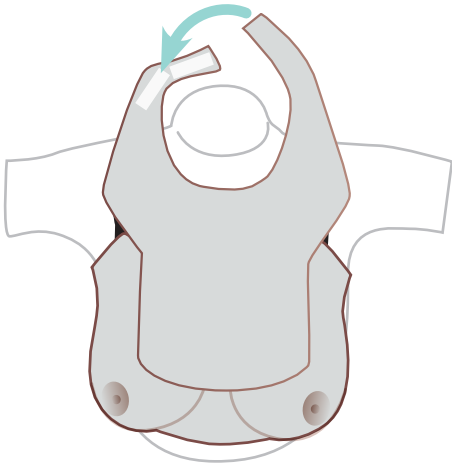

2

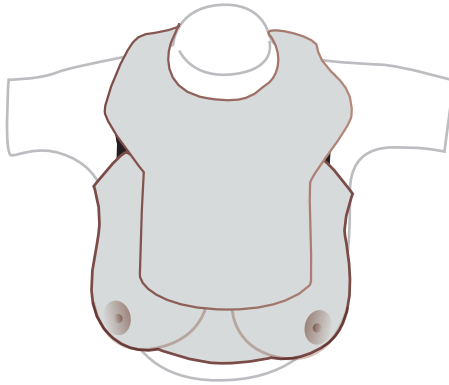

3

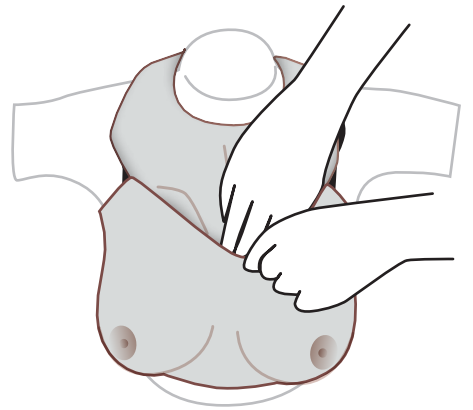






4



トレーニング


乳房を装着して使用する場合

トルソや模擬患者に装着する

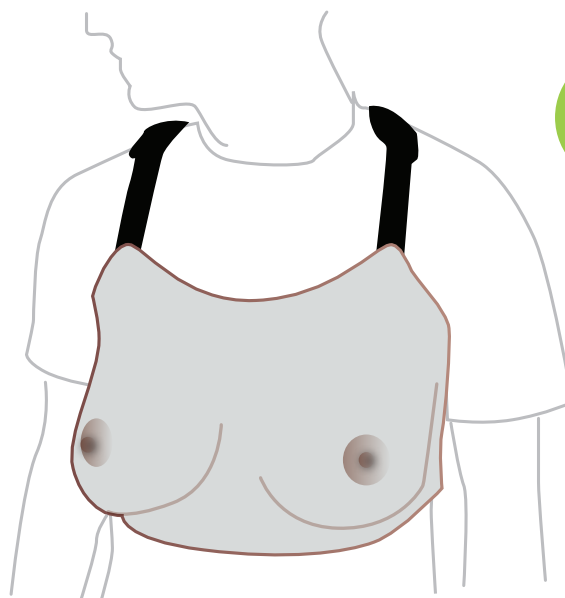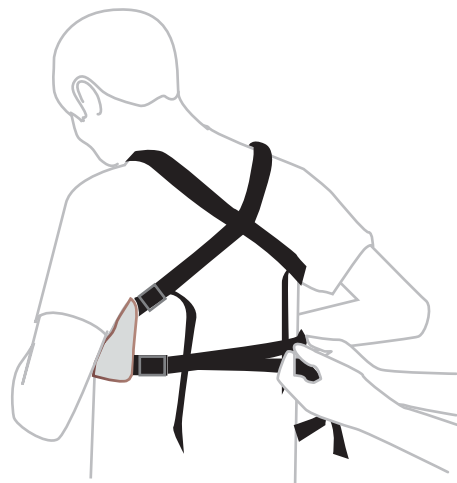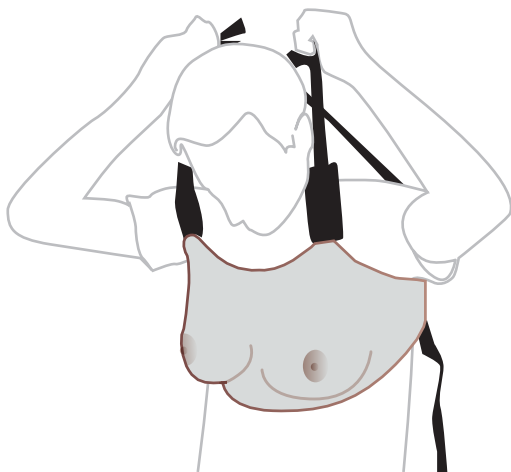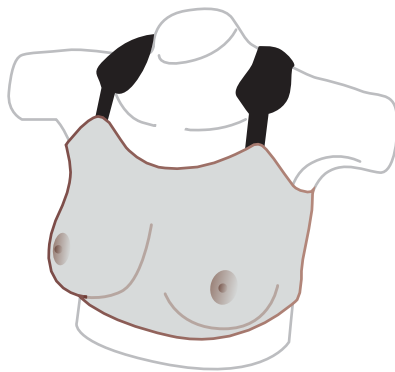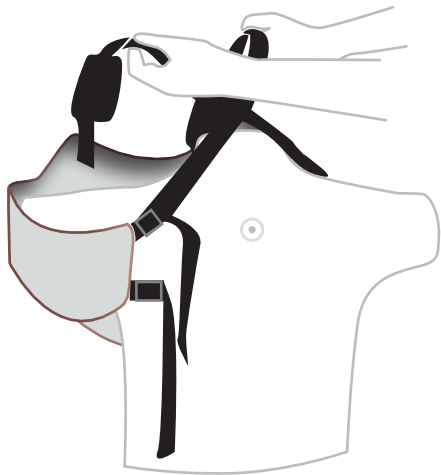

清掃と保管

使用後は毎回、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、
しっかり絞った後、やさしく拭いてください

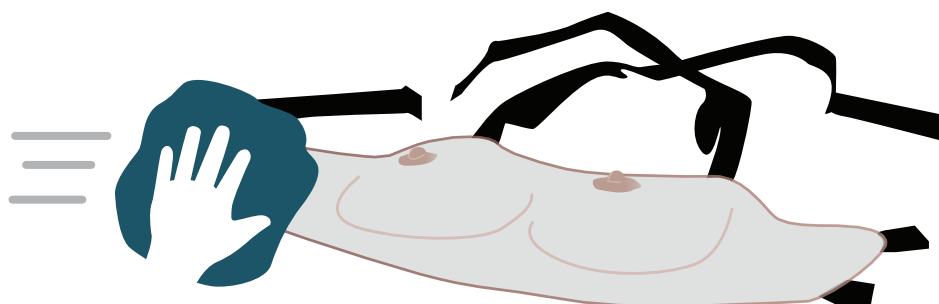

TAKE A LOOK
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com

OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings



Part No: 365-970

第1版 2021年9月
©2021 Limbs & Things

NLS 日本ライトサービス株式会社
Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp