



USER GUIDE



## 腰椎穿刺モデル

品番:16100



## インデックス

商品構成	3
安全と清掃の手引き	4
セットアップ	5
• スタンドを組み立てる	5
• カートリッジを取り付ける	7
• スキンパッドを取り付ける	9
• 硬膜内に水を循環させる	10
メンテナンス	11

TAKE A LOOK  
AT OUR VIDEO



VISIT THE WEBSITE  
[limbsandthings.com](https://limbsandthings.com)

OR YOUTUBE CHANNEL  
[youtube.com/limbsandthings](https://youtube.com/limbsandthings)

## 商品構成

腰椎・硬膜外穿刺用  
スタンド



腰椎・硬膜外穿刺用  
給水タンク



腰椎・硬膜外穿刺トルソ  
(スキン付き)



腰椎穿刺用 腰椎インサート

**161010** 購入時、腰椎インサートはパッドに装着されている場合があります。




腰椎穿刺パッド (2個)

**161011**



腰椎・硬膜外穿刺用スキンパッド

**161015**

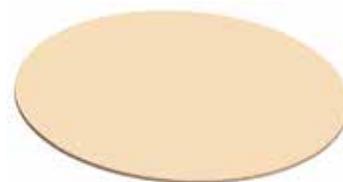

腰椎・硬膜外穿刺用硬膜  
スタンダード (2本)

**161017**




腰椎・硬膜外穿刺用インサート  
カートリッジ

**161020**



腰椎硬膜外穿刺用 仙骨インサート


**161021**

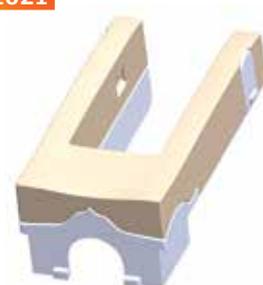

ARTマット (腰椎穿刺用)

**160130**

※別冊ガイド参照  
(折り曲げ厳禁)

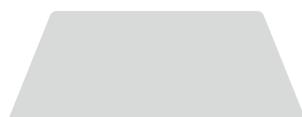

以下は、構成に含まれません。ご用意ください。

スパイナル針



マンメーター



## 安全と清掃の手引き

シミュレーターを使用される前に、この安全の手引きを確認してください

### DO's



- このガイドのすべての指示に従い厳守してください。
- すべての警告に注意してください。

- 製造元から供給されるアタッチメント消耗品だけ使用してください。



- 資格を有したサービス担当者にすべてのサービスを依頼してください。損傷した場合は、整備が必要です。



- 使用後は、柔らかい布やスポンジを中性洗剤を混ぜたお湯につけ、しっかり絞った後、やさしく拭いてください。



### DON'Ts



- 熱源の近くに設置したり、炎にさらしたり、火の近くで使用したりしないでください。
- 本製品の近くまたは上で可燃性の溶剤を使用しないでください。

- お客様のもとでの製品の分解や修理を禁止します。販売店から製造元に依頼をしてください。



- この機器をお子様を使用することは禁止します。

## 保管と移動





- ケガや製品損傷を防ぐため、輸送中や保管中に製品が適切に梱包、固定されていることを常に確認してください。



セットアップ

スタンドを組み立てる


1

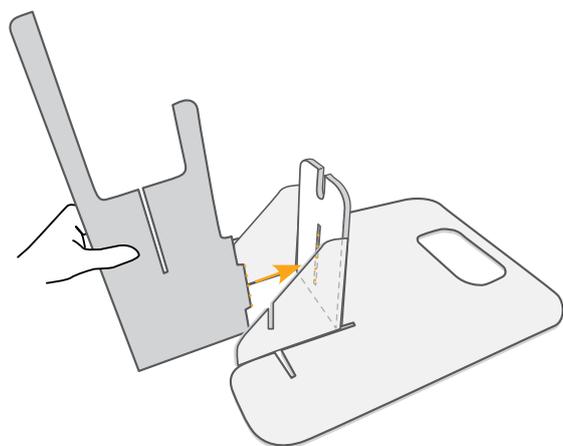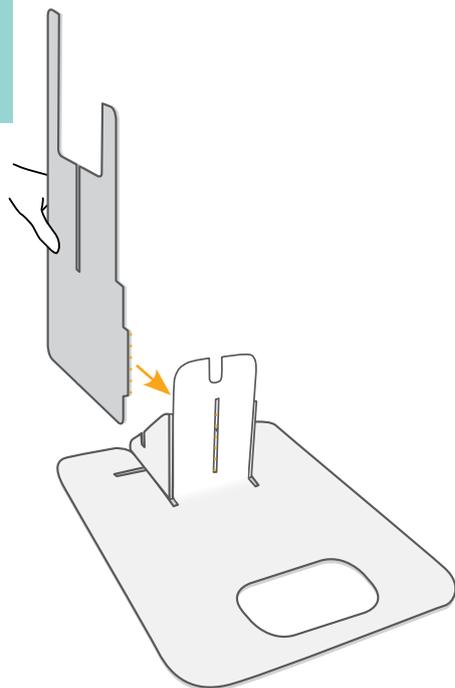


2

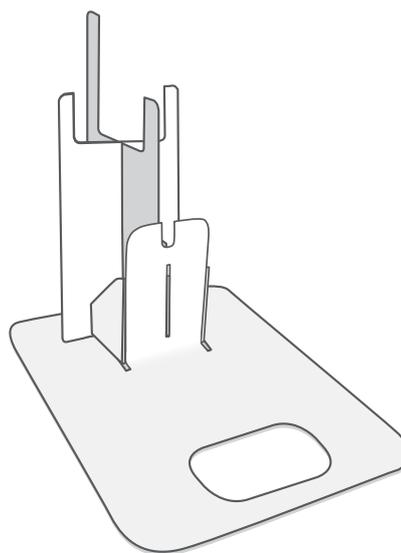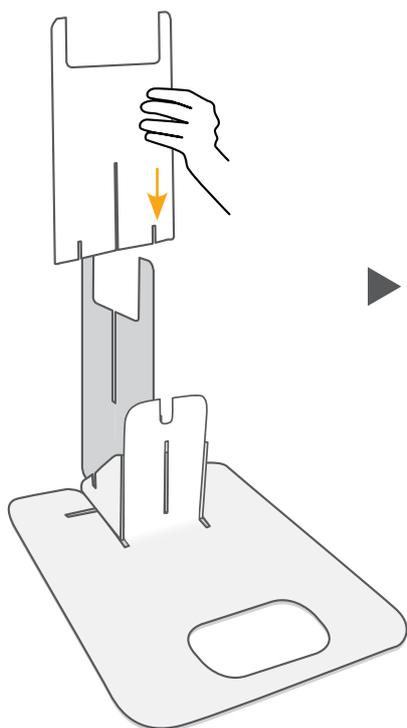

3

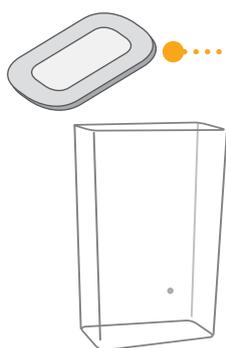


蓋をドリフトレーとして使用します。

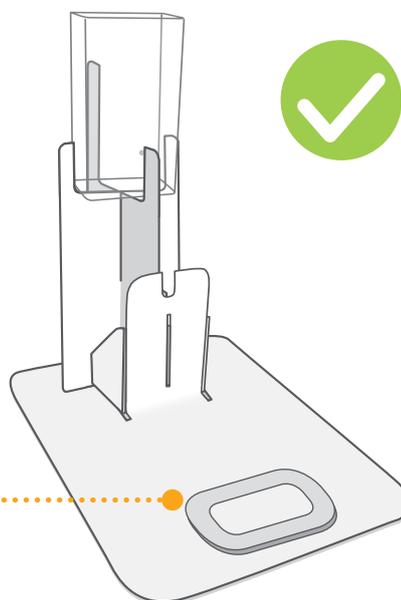


## セットアップ

### スタンドを組み立てる

4

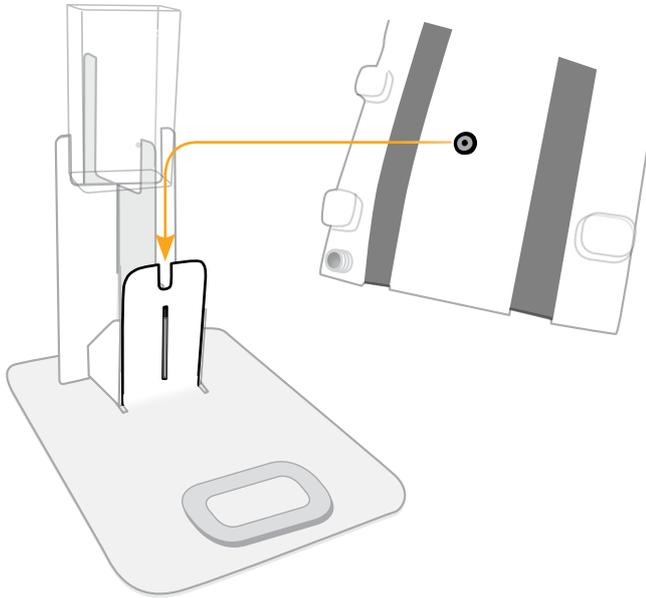


スタンドのくぼみにトルソ背部のフックがかみ合うように設置します

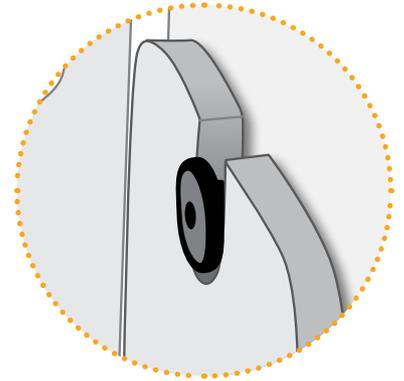

5


トルソは座位か、左側臥位でセットします

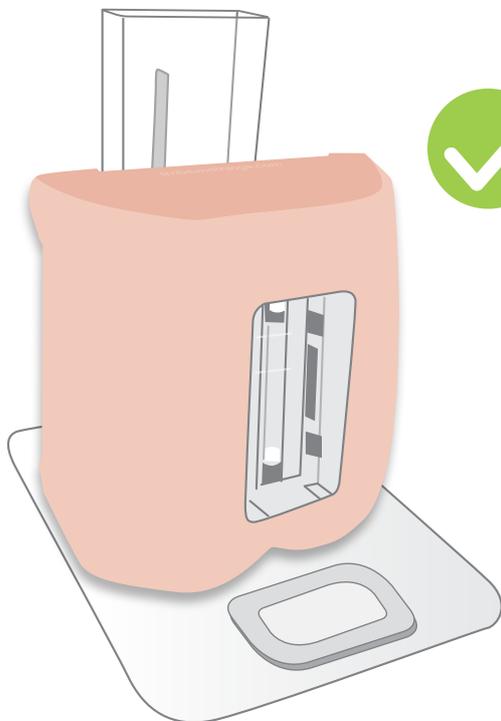

セットアップ

カートリッジを取り付ける

1

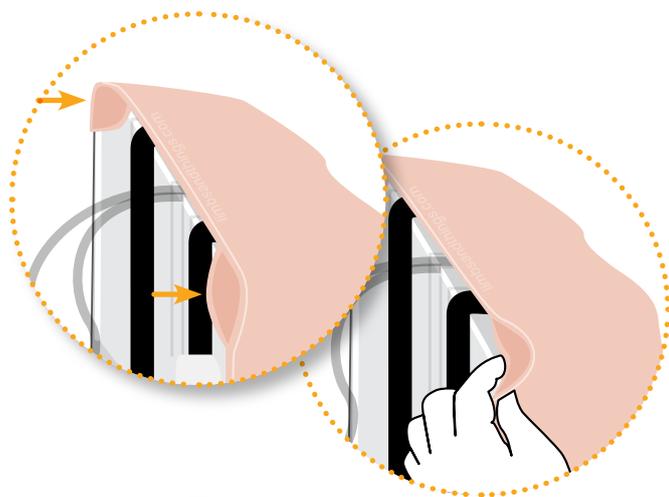

2




3




## セットアップ

## カートリッジを取り付ける


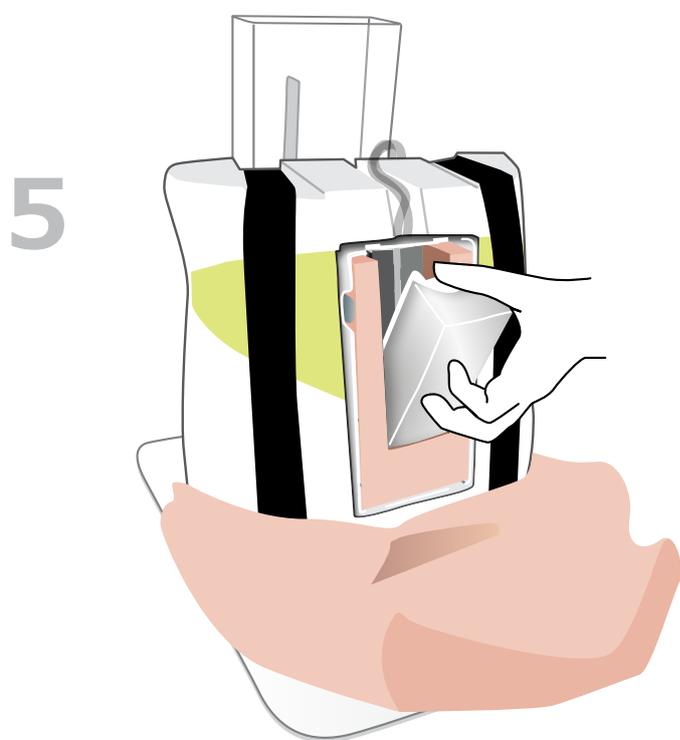


**T** パッドは下から先に差し込みます

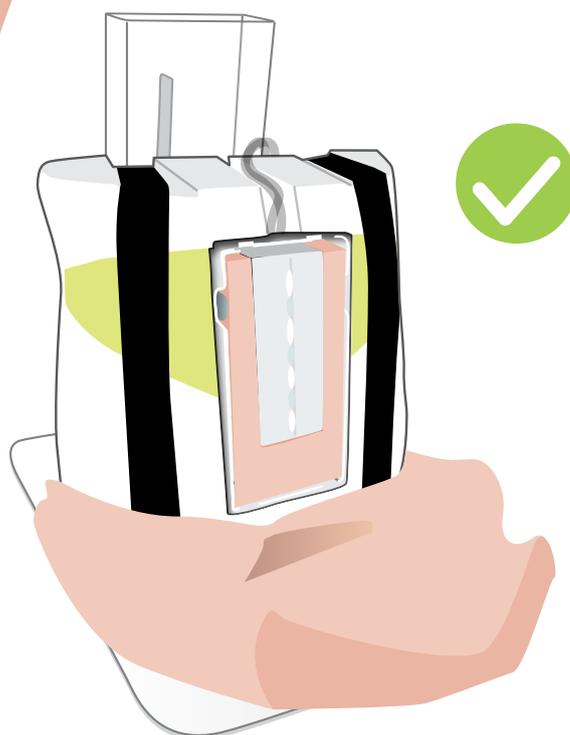

## セットアップ

## スキンパッドを取り付ける

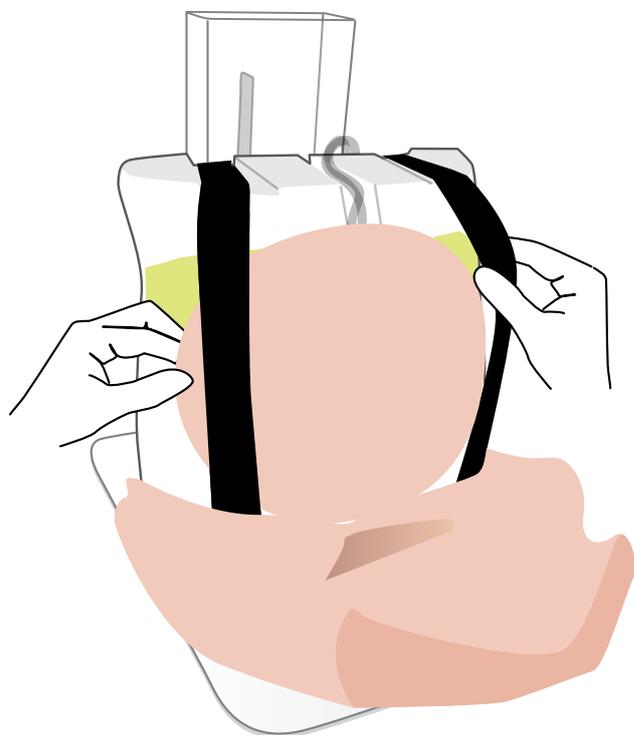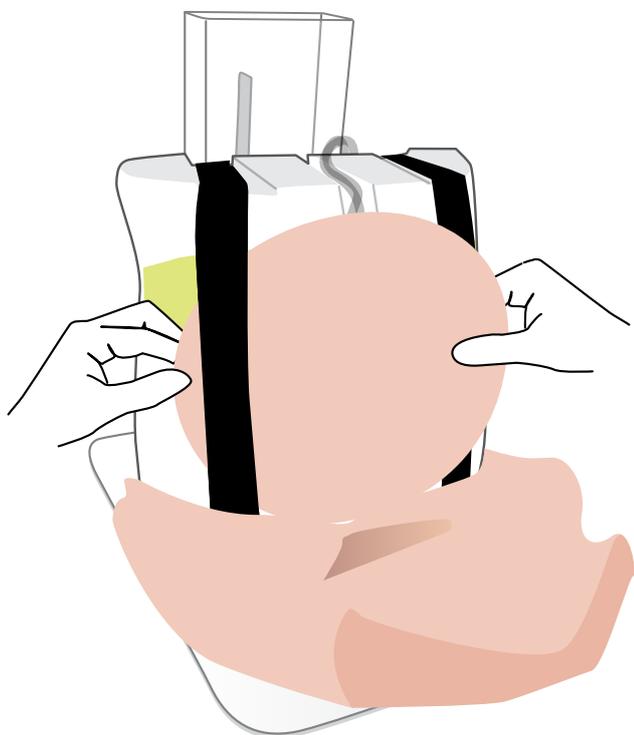



スキンパッドは適宜回転させることで、長期間使用できます。  
また、穿刺前に穿刺箇所を特定できてしまう問題も回避できます。




セットアップ

硬膜内に水を循環させる

1

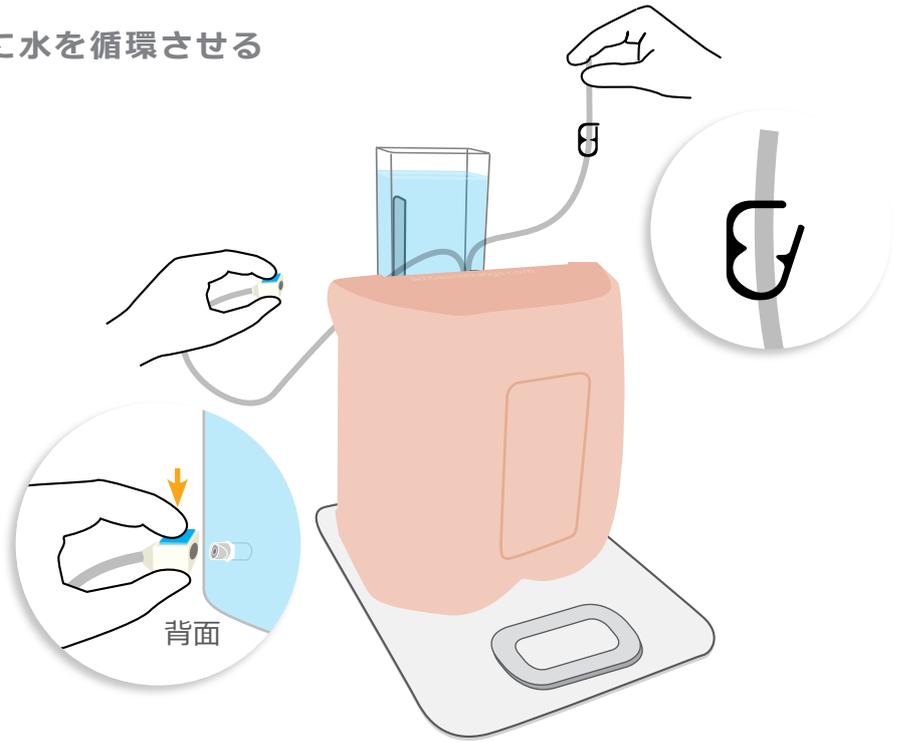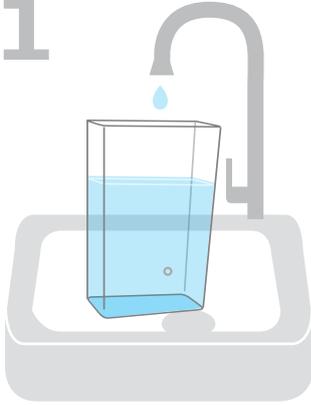

2

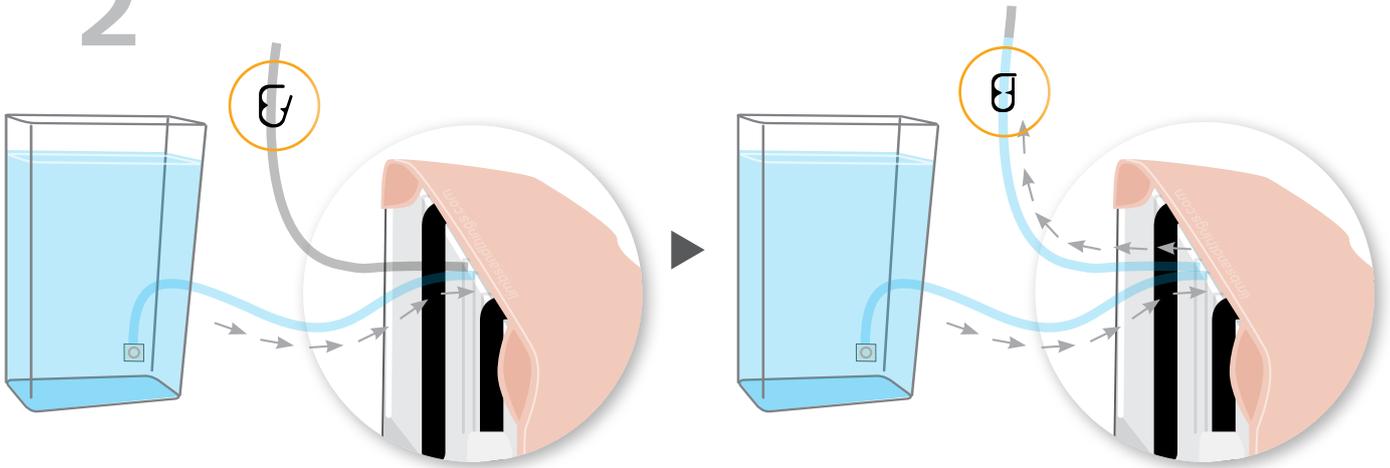

3




# メンテナンス

1







2

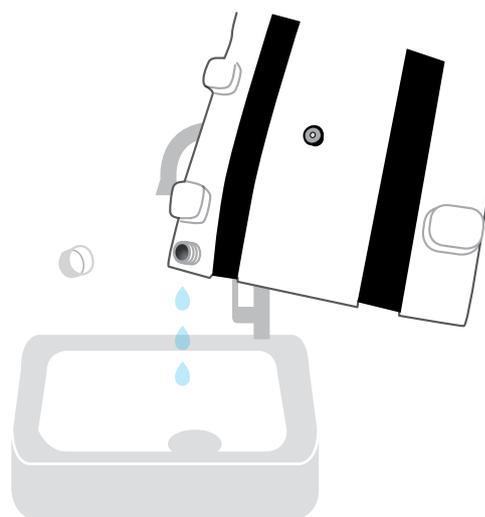

3



柔らかい乾いた布で水分をふきとります

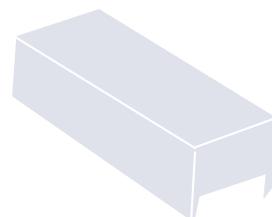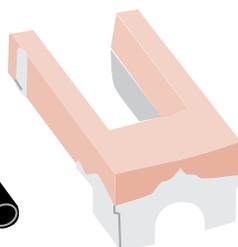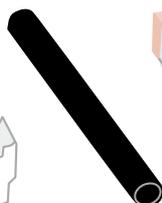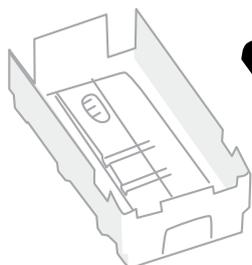

完全に乾燥したら組み立て保管します

YOU MAY  
ALSO BE  
INTERESTED IN...

腰椎・硬膜外穿刺  
モデル アドバンス

161001



エコーガイド  
腰椎・硬膜外穿刺  
モデル

161002



第2版 2023年10月  
© 2023 Limbs & Things

**NLS** 日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.  
医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-1

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp